



Fussstützen

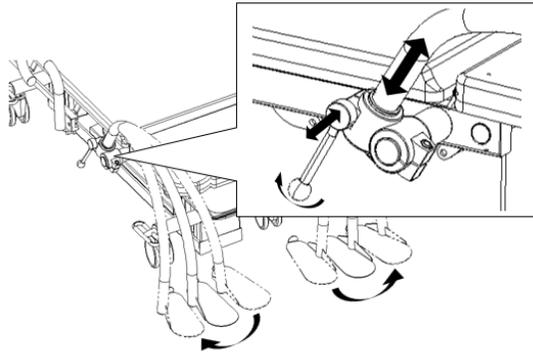

Achtung!
Max. Tragkraft pro Fussstütze 50 kg

Haltegriffe

Wichtiger Hinweis!
Achten sie stets darauf, dass die Haltegriffe auf der dafür vorgesehenen Seite R / L montiert werden.

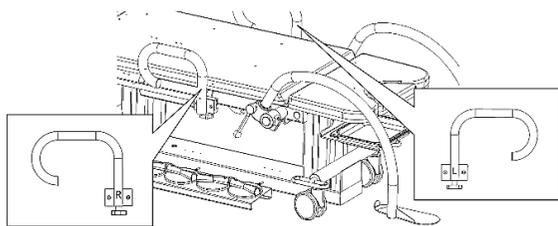

Achtung!
Max. Tragkraft pro Fussstütze 40 kg

Speichern von Positionen

1. Liege **positionieren**
2. **Kurz** die Speichertaste SET **drücken**
3. **Innerhalb 2 Sekunden** eine der drei Memorytasten **drücken**

- Es ertönt ein kurzer **Bestätigungston**

Wichtiger Hinweis!
Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Es wird immer die aktuelle Position der Liege gespeichert.

Sperrern von Funktionen


1. Eine Funktionstaste **drücken**
 2. **Gleichzeitig** die Sperrtaste **drücken**
- **Entsperren** auf gleiche Weise

Achtung!
Die gespeicherten Positionen können trotz Sperre der einzelnen Funktionen angefahren werden.


Initialisierung (LED auf dem Panel blinken)

Wichtiger Hinweis!
Bei einem Fehler / Positionsverlust der Antriebe lässt sich die Liege nicht mehr verfahren (LED's blinken). Das System muss neu initialisiert werden.

1. **Gleichzeitig** die beiden mittleren Richtungstasten **für 5 Sekunden drücken**

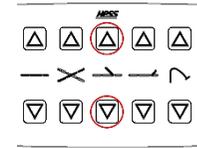

2. **Nacheinander** die Richtungstasten **drücken und halten**, bis der Antrieb durch den Endanschlag stoppt

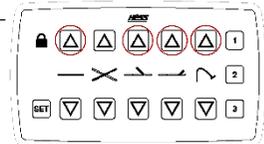

Achtung!
Bei Verfahren im Initialisierungsmodus, muss beim Verstellen der Liegeflächen auf mögliche Kollisionen der verschiedenen Liegeflächen geachtet werden.

Aufladen des Akkus

- Bei **niedrigem Akkustand** ertönt ein **Signal**
Die Liege kann noch einige Zeit weiter betrieben werden, bis zum endgültigen Stillstand
- **Aufladen** erfolgt über das Netzkabel und dauert 10 h

Wichtiger Hinweis!
Laden Sie den Akku spätestens 12 Monate nach der Auslieferung und danach mindestens alle 12 Monate, um eine Beschädigung zu verhindern.